

**Luminera**  
Injectable Beauty

 farmasera



# Hydryalix

*'Güzelliğin yeni tanımı'*

CE



# Hydryalix

Hydryalix, (Gentle / Deep / Ultra Deep / Lips) yumuşak dokuların liftingde kullanılan steril, apyrogenic bir jel olarak tasarlanmıştır.

## Neden Hydryalix?

- Mayıs 2013 tarihinden itibaren 85.000'in üzerinde uygulama
- Güvenilir emniyet profili
- Dermal dolgu alanında 20 yılın üzerinde tecrübe
- Biyo uyumlu ve Biodegradable
- 25'den fazla ülkede pazarda
- CE Sertifikası
- Hayvansal olmayan HA
- Volum artırıcı ve lifting etkisi
- HybridMoBi teknolojisi
- ISO9001 ve ISO13485 standartlarına göre üretim
- HA moleküllerinin uzun etkili olarak hazır enjeksiyonlu hali çift bağ prosesiyle BDDE kullanımıyla 3D ağı oluşturur
- Metabolizma olan BDDE'ler 2 ppm'den küçüktür

## Hydryalix'in İçeriği

Sodyum hyaluronat

(20 mg/ml), çift bağ

(BDDE < 2ppm)

Hydryalix 1,25 ml hazır  
şırınga ile sunulmaktadır



## Hydryalix Gentle

Ciltteki minör deri hasarlarını, yüzeysel hatların ve orta dereceli kırışıkların onarılmasında kullanılır. Bu ürün ağız çevresinde buruşuklar, çizgiler ve kırışıklarda kullanılır.

Yüzeysel olarak ve orta dermis bölgesine uygulanır.

Jel partikül ölçüsü: 100-300 um

Enjeksiyon derinliği: Yüzeysel ve orta dermis

Paket içeriği: 2 adet 1,25 ml kullanıma hazır şırınga

Tavsiye edilen iğne ölçüsü: 27G veya 30G thin-wall



## Hydryalix Deep

Yüzdeki derin kırışıklıkların ve çukurların nasolabial kıvrımlar gibi ve marionette hatlarının düzeltilmesinde kullanılır. Derin dermis bölgesine uygulanır.

Jel partikül ölçüsü: 700-900 um

Enjeksiyon derinliği: Derin dermis

Paket içeriği: 2 adet 1,25 ml kullanıma hazır şırınga

Tavsiye edilen iğne ölçüsü: 25G veya 27G thin-wall





# Hydryalix

## Hydryalix Ultra Deep

Yüzdeki derin kırışıklar, nasolabial kıvrımlar gibi hatlar ve yüzde oluşan çukurların yeniden şekillenmesinde ve düzeltilmesinde kullanılır. Derin dermis bölgesine, subkutan ve/ veya pre-periosteal bölgeye uygulanır. Jel partikül ölçüsü: 900-1100 um

Enjeksiyon derinliği: Subkutan, derin dermis ve pre-periosteal bölge

Paket içeriği: 2 adet 1,25 ml kullanıma hazır şırınga

Tavsiye edilen iğne ölçüsü: 25G veya 27G thin-wall



## Hydryalix Lips

Dudaklarda volüm artırıcı ve şekillendirici olarak kullanılır.


Orta ve derin dermis bölgesine uygulanır.

Jel partikül ölçüsü: 300-500 um

Enjeksiyon derinliği: Labial mukoza


Paket içeriği: 2 adet 1,25 ml kullanıma hazır şırınga

Tavsiye edilen iğne ölçüsü: 27G veya 30G thin-wall

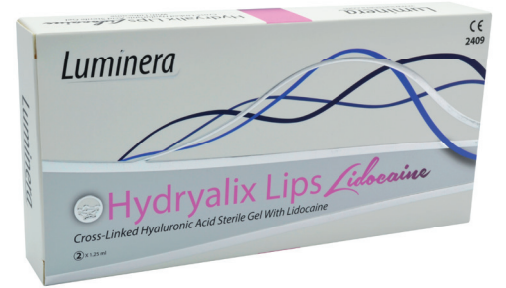

## Extrusion Force

\* Bütün uygulamalar 25G/16 mm iğne ile 1 ml /dak akım oranıyla enjekte edilmiştir. (0,31 mm iç çapında)

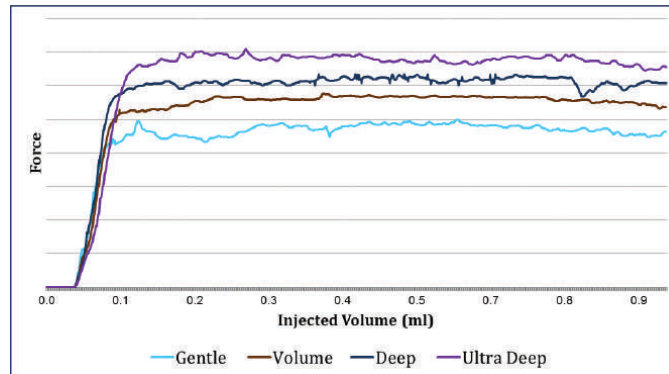


Hybrid MoBi™ teknoloji - Luminera'nın üretimde kullandığı yüksek teknolojisi ve çarpraz bağlı HA üretim hattı, çarpraz bağlı monofazik ve bifazik jel özelliklerinin her ikisinin Hydryalix'te bulunmasını sağlar.

Monofazik gel, homojen olarak çarpraz bağlı olması sayesinde kolay uygulanım sağlarken hafif ödem ve Tyndall gibi yan etkilerle daha düşük BDDE kullanıma neden olur.

İki bölümlü Bifazik gel, HA partiküllerinden oluşan yüksek çarpraz bağlı ve HA partiküllerinin çok seyrek olduğu çarpraz bağ olmayan bölümlerden oluşur.

Hybrid MoBi™ teknolojimiz, uygulanımı kolay ve düzgün, tam olarak homojen bir monofazik jeldir. Değişik parçacık ölçülerine göre kesilen gel, değişik endikasyonlarda etkili olmak üzere farklı ürünler olarak tasarlanmıştır. Gel parçacıklarının yapısı enjekte edilen etken maddeye arzu edilen şekli vermesine olanak verirken ürüne olan güveni sağlar. Bu özellik pazarda bulunan standart monofazik ürünlerde değil yalnızca Hydryalix ürünlerine aittir.

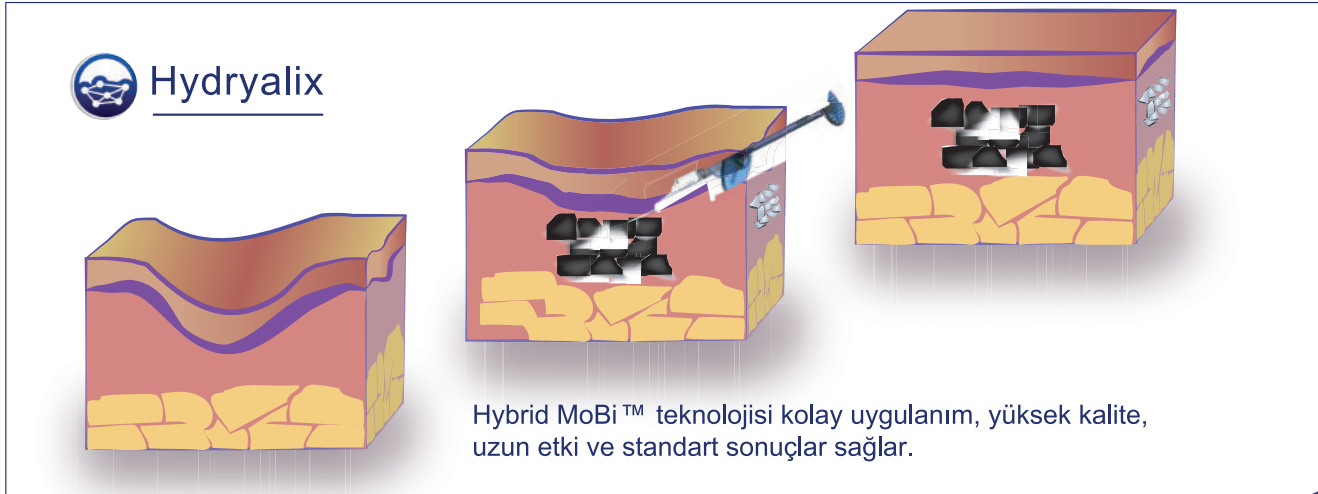

Hydryalix, monofazik ve bifazik dolguların birlikte göstereceği faydaları sağlar.



# Hydryalix Tedavi Alanları



- Endikasyonlar kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.
- Hydryalix yalnızca eğitimli sağlık meslek mensupları tarafından uygulanır.

Önce

Sonra

Hydryalix Gentle

Oral Commissure



Hydryalix Deep

Nasolabial folds



Hydryalix Ultra Deep

Nasolabial folds



Hydryalix Lips

Upper Lip



Resimler üzerinde müdahale yoktur.

*Luminera*  
Injectable Beauty



# Hydryalix



 farmasera

Farmasera Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.  
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4  
Cessas Plaza Akkom Ofis Park Kat: 10 No: 22 Ümraniye / İstanbul  
Tel: 0216 687 03 52 Faks: 0216 250 32 32  
info@farmasera.com www.farmasera.com

 /farmasera  /farmasera  /farmasera